

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 180811

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	大石医院 様		機番	100601
環営	所在地	長崎県佐世保市木宮町5-31号		納入日	平成24年12月12日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成30年06月29日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成30年08月11日
計	3				

修理依頼・不具合内容

酸素の消費が多い


不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

酸素ポンベ～減圧弁～酸素配管～OED-1000の経路で、OED-1000を調べましたが、漏れ箇所はありませんでした。

念のために酸素継手と酸素電磁弁を交換しました。今後も経過観察させていただきますようお願い申し上げます。

写真：交換部品一式

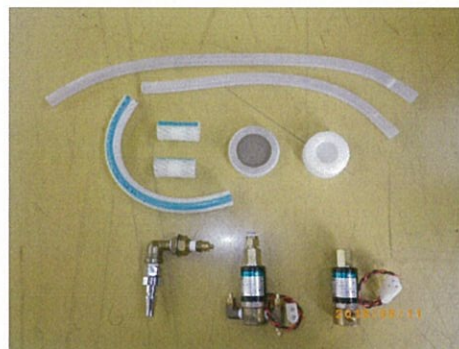

[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：酸素ガス配管の気密チェック・・・正常
- 3：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 4：出荷時の装置情報

交換後運転回数：231 殺菌：81、殺菌＋アルコール：1919、リークチェック：102
自己洗浄：1277、アルコール単独：13、エア単独：5

—以上—

承認
岩井 18.8.11
審査
中澤 18.8.11
作成
H30. 8. 11 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	酸素電磁弁	1式	SV-15、SV-16
2	酸素継手	1枚	
3	マニホールド周辺チューブ	1式	
4	水槽フィルタ	1個	
5	アルコールタンクキャップ	1個	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528