

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

05-23077

No. 181001

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	明午橋内科クリニック 様		機番	300054
環営	所在地	熊本県熊本市中央区南千反畑町 15-40		納入日	平成 25 年 08 月 20 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 30 年 06 月 21 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 30 年 09 月 06 日

修理依頼・不具合内容

定期保守点検 および 内部清掃

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水系統を中心に分解点検、洗浄いたしました。
あわせて定期保守点検を実施しました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：176→3 殺菌：14、殺菌＋アルコール：824、リークチェック：811
自己洗浄：648、アルコール単独：21、エア単独：18

—以上—

承認



審査



作成

H30. 10. 1

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品	1 式	ステー含む
2	タッチパネル	1 台	

（株）IHI アグリテック （旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528