

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20190718

発行日：令和元年 7 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100599
作業年月日	令和 元 年 7 月 18 日	作業時間： Hr
顧客名	住用診療所 様	TEL： 0997-69-2620
所在地	鹿児島県奄美市住用町大字西仲間111	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2012 年 12 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック 正常 ☒酸素ライン 正常 ☒アルコールライン 正常 ☒オゾンセンサ 正常 ☒給水ライン 正常 ☒濃度計流量 正常 ☒水位センサー 正常 ☒水漏れ確認 正常 ☒清掃 正常 ☒ 清掃 ☐トレイ 正常 ☒殺菌槽コネクタ 正常 ☒殺菌槽 LED 正常 ☒エアライン 正常 ☒オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 471排水栓、排水ライン 正常 ☒細管送水ライン 正常 ☒排気ライン 正常 ☒オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm異常音、振動 正常 ☒電源コード 正常 ☒殺菌チューブ類 正常 ☒マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数： 77→0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+アルコール： 76
	リークチェック： 74	自己洗浄： 2	アルコール単独： 0 エア単独： 74

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキヤップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

奄美市住用国民健康保険診療所

ご署名 野崎 義弘



修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者 作業者



中澤