

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼
番号

No. 191204

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株）福岡支店	殿	機種	OED-1000S
環営	環品	顧客名	あけだ胃腸科内科医院	様	機番	300074
		所在地	福岡県北九州市若松区青葉台 2-17-11		納入日	2013年10月17日
		点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	2019年12月25日
計	3	返送先	納入先と同じ		出荷日	2020年01月10日

修理依頼・不具合内容

排水異常2（E402）が12/17と12/20に発生した。
また、修理代替機が「給水異常」が発生した。

不具合原因と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転条件を振って確認しましたが、排水異常は再現しませんでした。
排水ポンプを分解したところ、写真のような「糸くず」が詰まっており
これが異常の原因と推察し、ポンプ全体を交換しました。

また、修理代替機が「給水異常」が発生したことから、念のために給水電磁弁を交換しました。

写真1：排水ポンプ内の糸くず



写真2：交換部品一式



[2] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71ppm・・・正常
2：運転確認・・・正常

[3] 装置情報

交換後運転回数：10 消毒：17、消毒＋アルコール：1598、リークチェック：0
自己洗浄：1587、アルコール単独：0、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水ポンプ	1	
	給水電磁弁	2	
	タッチパネル	1	予防交換
	コントロール基板	1	予防交換

承認



責任技術者



作成

R02.1.14

中澤

（株）IHIアグリテック （旧社名：IHIシパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528