

## 保守点検・修理 報告書

発行日：令和 2年 3 月 11 日

|       |                                                                                                       |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> |                                                                       | 製造番号： 100167      |
| 作業年月日 | 2020 年 3 月 11 日                                                                                       |                                                                       | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | いまとみクリニック 様                                                                                           |                                                                       | TEL： 0979-24-8688 |
| 所在地   | 福岡県築上郡吉富町今吉232-1                                                                                      |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 富士フィルムメディカル                                                                                           |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2011 年 3 月 3 日                                                                                        | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検ソール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

## 不具合状況、依頼内容、異常履歴

リークチェック受付（くさつき）ナット締めで対応して、  
固定部が歪みても回り最終的にはナット（ボルト部）が折れた  
永久的に交換した。

## 不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |    |                                                                 |              |    |                                                |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 546   |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7/ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 糸ボース交換 3ヶ  |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    | <input type="checkbox"/>                       |

## 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今回の点検ではすべて正常でした。

|      |               |                |            |                |
|------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 124  | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒： 239 | 殺菌/消毒+アル： 1124 |
|      | リークチェック： 1259 | 自己洗浄： 876      | アルコール単独： 1 | エア単独： 3        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| ナット分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ナット水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ナット水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコール747712交換 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 11 日

ご署名

今野 亨  
印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

今野 亨  
印