

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 190905

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿	機種	OED-1000S Plus
客先	顧客名	星和会クリニック 様	機番	500009
環営	所在地	長崎県諫早市永昌東町 2-17	納入日	2018年09月07日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2019年05月30日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2019年09月02日

不具合内容

5/17 3回正常終了
10:59~11:49 オゾン水生成注意、オゾン水生成異常発生
3回正常終了
5/21 3回正常終了

不具合原因（故障箇所）と処置


修理が遅れまして大変申し訳ありませんでした。下記の通りご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転条件を振って確認しましたが、異常は再現しませんでした。
オゾンガス系統を中心に分解点検しても異常はありませんでした。

酸素流量を調整し、オゾン水を製造するアスピレータを交換しましたので
様子を見てくださいますよう、お願いいたします。

写真：交換部品一式

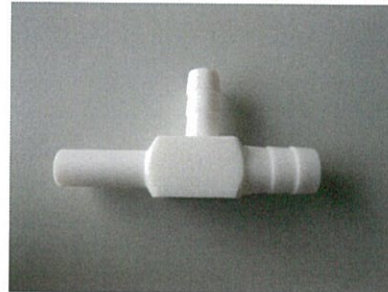

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	アスピレータ	1個	

承認

若
19.9.-5
井

審査

中
19.9.-5
澤

作成

R01.9.05

中澤

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528