

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191018
発行日: 2019 年 10 月 18 日

販売名 / サ-ビ-スマニ-7# Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 S00014 (左)
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 10 月 18 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	健三郎クリニック 様	TEL: 099-805-0567
所在地	鹿児島県鹿児島市山下町9-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 26 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2019年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 5% O.05MPa (赤)	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒ 交換済	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パ-ル数 864
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレ- 正常 ☒ 洗剤ボトル交換 → 手順のため	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒ オ-ルパス
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
酸素ポンプの交換をお願いしました	

装置 情報	交換後運転回数: 860 → 0 更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒: 480 / 472	殺菌/消毒+7# : 382 / 379
	リークチェック: 34	自己洗浄: 246	7#コ-ル単独: 2
			エア単独: 4

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒			オゾン分解触媒 ☒	1	吸盤 ☒	3
交換後 No. 17092832			排水栓 ☒	1	エアフィルター ☒	1
オゾンセンサー ☒			接続コネクタ; 水槽側 ☒	1	水フィルター ☒	1
			接続コネクタ; チューブ側 ☒	1		
			オゾン水濃度計用フィルタ ☒	1		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 10 月 18 日

ご署名 松本 

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	中澤