

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

05-22563

No. 180605

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0
客先	1	顧 客 名	十 善 会 病 院 様			機 番	1 0 0 0 7 1
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	長崎県 長崎市籠町 7 - 1 8			納 入 日	平成 22 年 8 月 10 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成 30 年 04 月 12 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 30 年 06 月 05 日
計	3						

修理依頼・不具合内容

タッチパネルが起動しない

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

工場で運転確認したところ、一度起動した後、起動しなくなりました。
タッチパネル単独の故障で、これを交換して復旧しました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：タッチパネル～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 3：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.68ppm・・・正常
- 4：出荷時の装置情報

交換後運転回数：92 殺菌：5311、殺菌＋アルコール：4023、リークチェック：4847
自己洗浄：1878、アルコール単独：948、エア単独：48

—以上—

承認



審査



作成

H30.6.05
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	タッチパネル	1台	カラー型
2	フタパッキン	1枚	
3	配管、パッキン	1式	アルコールタンクキャップ含む
4	排水ポンプ	1式	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528