

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 11 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300316
作業年月日	2020 年 11 月 11 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	安元内科・胃腸クリニック 様		TEL： 092-292-8703
所在地	福岡県福岡市博多区吉塚本町13-27-2F		ご担当 様
販売店	株式会社スマイルラボ 様		ご担当 古賀 様
納入年月日	2014 年 9 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 705
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒ 左上部ピンヒールあり	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
今回の点検はすべて正常でした。					
※ 次回点検時には、オゾン水濃度計の交換をお勧め致します。1台の交換価格は25,000円（税別）です。					

装置 情報	交換後運転回数： 261	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 1090	殺菌/消毒+7L： 2811
	リークチェック： 2548	自己洗浄： 1476	7L単独： 2	エア単独： 9

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール消毒液	7L	☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 11 月 11 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 河野 京子 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

