

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 4 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500247
作業年月日	2020 年 4 月 8 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	柏木内科医院 様		TEL: 093-921-7943
所在地	福岡県北九州市小倉北区片野2丁目21-10		ご担当 崎村 様
販売店	株式会社東京ダイヨー器械店 北九州		ご担当 島村 様
納入年月日	2019 年 4 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 786
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304/17/2A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

バーコードは20分以内に入力
この日の点検すべて正常でした。

装置 情報	交換後運転回数: 232 更新 (リセット) 実施・未実施		消毒 (総運転回数): / / 消毒 (洗剤洗浄あり):	
	消毒+アル (総運転回数): 232		消毒+アル (洗剤洗浄あり):	
	リークチェック: 0	自己洗浄: /	アルコール単独: 0	エア単独: /

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	045-15E	オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No. 13051422			排水栓	☒		エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☐		水フィルター	☒	
	☐		オゾン水濃度計用フィル	☒			☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 4 月 8 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 柏木陽一郎



修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者