

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

05-26674

No. 200402

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿	機種	OED-1000
環営	環品	顧客名	田中宏明内科胃腸科クリニック 様	機番	100402
		所在地	福岡県福岡市城南区片江4丁目1-6	納入日	2011年12月15日
		点検者	中澤 一裕	作業時間	
		受付日	2020年02月28日	出荷日	2020年03月30日
計	3	返送先	納入先と同じ		

修理依頼・不具合内容


まれにフタが開かない。

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異常は再現しませんでした。 「フタロックソレノイド」が劣化していました。
これが劣化するとロックが解除できず、フタが開かなくなります。
この部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式

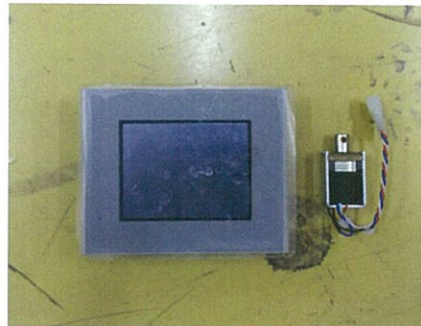

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：37 殺菌：1422、殺菌＋アルコール：1460、リークチェック：2577
自己洗浄：807、アルコール単独：9、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	フタロックソレノイド	1	
2	タッチパネル（カラー型）	1	操作方法は同じです
3			
4			

承認



責任技術者



作成

R02.4.2

中澤

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528