

## 保守点検・修理 報告書

発行日：平成29年 5 月 20 日

|       |                                                                                                      |                                                                       |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       | 製造番号： 300423 |
| 作業年月日 | 2020 年 5 月 20 日                                                                                      |                                                                       | 作業時間： 1.5 Hr |
| 顧客名   | 長丘五丁目クリニック 様                                                                                         |                                                                       | TEL：         |
| 所在地   | 福岡県福岡市南区長丘5丁目28-10                                                                                   |                                                                       | ご担当 様        |
| 販売店   | 福岡医師共同組合                                                                                             |                                                                       | ご担当 守屋 様     |
| 納入年月日 | 2014 年 9 月 30 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品          |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>               | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |              |

|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                           |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 395    |
| オゾンセンサー                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.20 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    |                                                 |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 今回の点検はすべて正常でした。           |    |                                                                 |              |    |                                                 |

|          |             |                                                       |            |               |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 39 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 殺菌/消毒： 7   | 殺菌/消毒+アル： 223 |
|          | リークチェック： 0  | 自己洗浄： /                                               | アルコール単独： / | エア単独： /       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ポンプ分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ポンプ水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ポンプ水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 脱カカルシウム剤     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | アルコールふきとり剤   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |

|                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                                                            | 2020 年 5 月 20 日                                                                       |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |                                                                                       |
| ご署名 松岡正樹                                                             |  |

修理業者

 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
 福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
 TEL：092-622-0055

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者 | 作業者                                                                                   |
|       |  |