

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 6 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500323
作業年月日	2020 年 6 月 16 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	太田外科クリニック 様		TEL: 092-952-2250
所在地	福岡県筑紫郡那珂川市片縄東1丁目13-18		ご担当 様
販売店	㈱MVC		ご担当 青木 様
納入年月日	2019 年 6 月 19 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バル数 1034
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☐	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☐ Ver. 0304 T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今日の点検はすべて正常でした。

■次回より保守点検料¥78,000がかかりますのでご了承お願い致します。

装置 情報	交換後運転回数: 51	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 3	消毒 (洗剤洗浄あり): 0
	消毒+アル (総運転回数): 48		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 47	
	リークチェック: 52	自己洗浄: 46	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 51905/161			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

2020年 6 月 16 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 太田 慎治



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

