

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 200427

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	安心院クリニック 様	機番	100808
環営	所在地	大分県宇佐市安心院町下毛 2015	納入日	2013年07月18日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		2020年04月06日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020年04月22日

修理依頼・不具合内容

水槽底部より水漏れ※ ※新鋭工業殿 現地にて確認済み
水温センサー異常 (E106)

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果と重要なお知らせ

排水栓側にある「ドレンASSY」の継手が劣化してそこから水が漏れていました。
この部品交換の他、異常履歴からコントロール基板を実施して復旧いたしました。

なお、基板交換に伴い、タッチパネルの表示を「OED-1000S」に変更させていただきます。
操作上に大きな変更はありませんので何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

写真1：ドレンASSY

写真2：コントロール基板



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：28 消毒：13、消毒+アルコール：287、リークチェック：285
自己洗浄：282、アルコール単独：0、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレンASSY	1式	
2	コントロール基板；OED-1000S	1式	今回無償

承認

若
20.4.27
井

審査

中
20.4.27
澤

作成

R02.4.27

中澤