

保守点検・修理 報告書

発行日：平成29年 7 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300317
作業年月日	2020 年 7 月 8 日		作業時間： 2.5 Hr
顧客名	桜十字博多駅前診療クリニック 様		TEL： 092-260-9915
所在地	福岡県福岡市博多区博多駅前中央街8番1号JRJPビル8F		ご担当 看護師 池田 様
販売店	(株)MVC		ご担当 青木 様
納入年月日	2016 年 8 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 502
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今回の点検はすべて正常でした。

今回の点検費用は、MVC様より保守点検料¥70,000（税別）とタッチパネル交換料¥25,000（税別）のご請求となります。

装置情報	交換後運転回数： 1137	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 3281	殺菌/消毒+アル： 1858
	リークチェック： 18	自己洗浄： 648	アルコール単独： 27	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 7 月 8 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 池田

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店

福岡県福岡市東区多の津5-11-25

TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

