

保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年 7 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100250
作業年月日	2020 年 7 月 7 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	むらかみ医院 様		TEL： 093-671-1888
所在地	福岡県北九州市八幡東区枝光4-3-4		ご担当 村上 様
販売店	(株)東京ダイヨー器械店 北九州		ご担当 ☒ 様
納入年月日	2011 年 6 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒ 不具合あり
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 4/9
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☐
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

全項目点検は、エラーメッセージが出たので、代替機をご用意したので、社内にて確認、テスト頂き、他すべて正常でした。

装置情報	交換後運転回数： 96	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+7L： 24/
	リークチェック： 242	自己洗浄： 218	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール75%アルコール交換		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 7 月 7 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

村上 様



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

