

保守点検・修理 報告書

発行日: 2020 年 7 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500345
作業年月日	2020 年 7 月 20 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	つるどめ乳腺・大腸・肛門クリニック 様		TEL: 093-471-0881
所在地	福岡県北九州市小倉南区葛原東3-2-7		ご担当 院長先生 様
販売店	(株)アステム		ご担当 様
納入年月日	2019 年 7 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 774
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0304/T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

本日の点検はすべて正常で終了。(トレーの取手以外)

■次回、令和3年より保守点検費用¥78,000(税別)がかかりますのでご了承お願い致します。

装置 情報	交換後運転回数: 349	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒(総運転回数): 48	消毒(洗剤洗浄あり):
	消毒+アル(総運転回数):	48 301	消毒+アル(洗剤洗浄あり):	
	リークチェック: 440	自己洗浄: 2	7%アルコール単独: 144	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	3
交換後 No. 51904164			排水栓	☒	1	エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐		水フィルター	☒	1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1		☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 7 月 20 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

