

保守点検・修理 報告書

発行日：平成29年 8 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100259
作業年月日	2020 年 8 月 17 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	ひめの胃腸科内科クリニック 様		TEL： 092-559-5211
所在地	福岡市南区大橋4-27-4		ご担当 原野 様
販売店	(有)医療設備企画		ご担当 荒木 様
納入年月日	2011 年 8 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 551
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒ 左の下部にビーズあり	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今日の点検ではトレーのビーズ以外すべて正常でした。

装置情報	交換後運転回数： 328	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 614	殺菌/消毒+アル： 3041
	リークチェック： 3602	自己洗浄： 1669	アルコール単独： 36	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

2020 年 8 月 17 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 原田富士子 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

