

管理 No.

# 保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 9 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号： 100751
作業年月日	2020 年 9 月 28 日	作業時間： 2 Hr
顧客名	博多駅東クリニック 様	TEL： 092-473-9177
所在地	福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-9	ご担当 様
販売店	(株)アステム	ご担当 様
納入年月日	2013 年 4 月 30 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

---

不具合原因、作業内容

---

点検項目

フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 462
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 969 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>	
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など） 連絡事項、特記事項

今日の点検はすべて正常でした。


装置情報	交換後運転回数： 2390	更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施	殺菌/消毒： 12235	殺菌/消毒+アル： 4749
	リークチェック： 4717	自己洗浄： 1812	アルコール単独： 76	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1	マニホールド交換		<input checked="" type="checkbox"/>	1
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1	給水フィルタ		<input type="checkbox"/>	1

お客様ご確認署名欄

2020 年 9 月 28 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名  印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
 福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
 TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

