

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 11 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100087
作業年月日	2020 年 11 月 19 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	りょうすけ内科外科 様		TEL： 092-865-2700
所在地	福岡県福岡市城南区樋井川2-9-15		ご担当 様
販売店	富士フイルムメディカル(株)福岡支店		ご担当 様
納入年月日	2010 年 5 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 484
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 同軸ケーブル式

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今日の点検はすべて正常でした。今後は経年劣化に伴い、保守点検交換部品以外の修理が発生する可能性がございます。

装置情報	交換後運転回数： 339	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 509	殺菌/消毒+7L： 2486
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1907	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	7L2-113-12フィル		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	3.5L-114-12同軸ケーブル式		☒	1

お客様ご確認署名欄

2020 年 11 月 19 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

山田 良介



修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

