

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年 12 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300448
作業年月日	2020 年 12 月 22 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	岸本内科クリニック 様		TEL：093-582-5900
所在地	福岡県北九州市小倉北区今町1-16		ご担当 様
販売店	(株)サクラメディカル		ご担当 井本 様
納入年月日	2015 年 2 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 593
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

保守点検部品交換後、試運転中にコントロール基板の不具合を確認致しました。

12/24コントロール基板交換無償致しました。コントロール基板交換後の動作確認ではすべて正常でした。

■ご購入後5年を経過致しましたので、次回の点検時にガ-ッパ 様の交換をお勧めいたします（¥25,000税別）

装置情報	交換後運転回数：48	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒：6	殺菌/消毒+7L：508
	リークチェック：0	自己洗浄：469	アルコール単独：	エア単独：509

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールふたブルー	無償	☒	1
オゾンセンサー		☒	1	コントロール基板	無償	☒	1

お客様ご確認署名欄

2020 年 12 月 22 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 岸本正希 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者 作業者

