

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 3 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100167
作業年月日	2021 年 3 月 3 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	いまとみクリニック 様		TEL： 0979-24-8688
所在地	福岡県築上郡吉富町今吉 232-1		ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社 北九州営業所 様		ご担当 様
納入年月日	2011 年 3 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 577
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 971 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
		☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
今日の点検はすべて正常でした。			

装置 情報	交換後運転回数： 118	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 258	殺菌/消毒+7L： 1223
	リークチェック： 1.372	自己洗浄： 970	7L単独： 1	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3年 3 月 3 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 <u>今田 亨亮</u> 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

