

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 4 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100070
作業年月日	2021 年 4 月 26 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	ピーエスクリニック 様		TEL： 092-283-7777
所在地	福岡県宗像市田久4-15-12		ご担当 様
販売店	株式会社 渡辺商会 様		ご担当 様
納入年月日	2010 年 9 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 479
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺フューズ	正常	☒
		☐	☐		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
今日の点検はすべて正常でした。水漏れの件は排水栓ナットの緩みによる水漏れで、 バルブの経年劣化による水漏れで、次回漏れた場合は修理対応になります。 渡辺商会 井田 090-5914-4032

装置情報	交換後運転回数： 37	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 251	殺菌/消毒+7L： 319
	リークチェック： 0	自己洗浄： 4/3	7Lコールド： 2	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3年 4 月 26 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 小林 由美  印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

