

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

20210121

発行日： 2021

年 1 月 21 日

|                               |                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> Ver. 3.1                                               | 製造番号 500588                     |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> Ver. 3.1                                              | 作業年月日 2021 年 1 月 21 日           |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 1.0                            | 作業時間 Hr                         |
| 顧客名                           | 生駒外科医院 様                                                                                            | TEL : 0993-22-3059              |
| 所在地                           | 鹿児島県指宿市湊2-23-20                                                                                     | ご担当 様                           |
| 販売店                           |                                                                                                     | ご担当 様                           |
| 納入年月日                         | 2020 年 11 月 13 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>                         | 付属品                             |
| 作業区分                          | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |                                 |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/>   | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                   |                                                            |
| オゾン水生成注意 (E110) , オゾン水生成異常 (E207)<br>2020年12月14日より頻発している          |                                                            |
| 不具合原因、作業内容                                                        |                                                            |
| オゾナイザーに水が逆流して性能が低下したことが原因でした。<br>この部品と逆流に関する部品を交換しました。<br>(★で表示)  |                                                            |
| 点検項目                                                              |                                                            |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                      | 水槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン 正常 <input type="checkbox"/>                                 | エアライン 正常 <input type="checkbox"/>                          |
| アルコールライン 正常 <input type="checkbox"/>                              | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 1066 |
| オゾンセンサー 正常 <input type="checkbox"/>                               | 排水栓、排水ライン 正常 <input type="checkbox"/>                      |
| 給水ライン 正常 <input type="checkbox"/>                                 | 細管送水ライン 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 濃度計流量 正常 <input type="checkbox"/>                                 | 排気ライン 正常 <input type="checkbox"/>                          |
| 水位センサー 正常 <input type="checkbox"/>                                | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.77 ppm   |
| 水漏れ確認 正常 <input type="checkbox"/>                                 | 異常音、振動 正常 <input type="checkbox"/>                         |
| 清掃 正常 <input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>        | 電源コード 正常 <input type="checkbox"/>                          |
| トレー 正常 <input type="checkbox"/>                                   | 殺菌/消毒 チューブ類 正常 <input type="checkbox"/>                    |
| 水槽側コネクタ 正常 <input type="checkbox"/>                               | マニホールド周辺チューブ 正常 <input type="checkbox"/>                   |
|                                                                   | 運転プログラムバージョン 正常 <input type="checkbox"/> Ver. /            |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項                                        |                                                            |
| 今年の1/14にオゾン生成異常 (E205) と排水異常 (E401) が各1回出ています。<br>この時の状況を教えてください。 |                                                            |

|          |              |                                                                               |               |                  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 156 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 94 / 2 | 殺菌/消毒+アル： 62 / 9 |
|          | リークチェック： 51  | 自己洗浄： 8                                                                       | アルコール単独： 0    | エア単独： 0          |

| 交換部品名称  | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 交換・数量                    | 交換部品名称         | 交換・数量                                 |
|---------|-------------------------------------|----|--------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| オゾン水濃度計 | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン分解触媒      | <input type="checkbox"/> | 吸盤、小物入れ        | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| 交換後 No. |                                     |    | 排水栓          | <input type="checkbox"/> | エアフィルター        | <input type="checkbox"/>              |
| オゾンセンサー | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   | <input type="checkbox"/> | 水フィルター         | <input type="checkbox"/>              |
| オゾナイザー  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 | <input type="checkbox"/> | ★ 0.2 汎用弁      | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| ★ スピーカー | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン水濃度計用フィルタ | <input type="checkbox"/> | ★ 0.2 電磁弁 SV16 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| お客様ご確認署名欄                                                            | 年 月 日       |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 | ご署名 坂口 健一 印 |

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)  
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6  
TEL:086-944-6528

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 責任技術者             | 作業者 |
| 中<br>21.1.21<br>澤 | 中澤  |