

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和 3 年 10 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500578
作業年月日	2021 年 10 月 19 日		作業時間：	1.5 Hr
顧客名	おおつかクリニック		TEL：	093-331-3088
所在地	福岡県北九州市門司区栄町8-18		ご担当	様
販売店	(株)アステム小倉支店		ご担当	小森 様
納入年月日	2020 年 10 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 914
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 030X / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

■今回は初回に付き無償点検です。次回の点検より¥78,000（税別）がかかりますのでご了承お願い致します。

今回の点検はすべて正常でした。

装置 情報	交換後運転回数： 93	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒（総運転回数）： 6	消毒（洗剤洗浄あり）： 0
	消毒＋アル（総運転回数）： 87	消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 84		
	リークチェック： 0	自己洗浄： 81	7Lコールド： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	3
交換後 No. 18012994			排水栓	☒	1	エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☒		水フィルター	☒	1
130725-031			オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1		☐	
	☐			☐			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 19 日
北九州市門司区栄町8-18

医療法人 健栄会 おおつかクリニック

ご署名

理事長 大塚 祥司

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

