

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和 3 年 11 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500605
作業年月日	2021 年 11 月 2 日		作業時間：	1.5 Hr
顧客名	須恵外科胃腸科医院		TEL：	092-936-2355
所在地	福岡県糟屋郡須恵町植木609-3		ご担当	様
販売店	(株) MVC		ご担当	青木 様
納入年月日	2020 年 11 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 704
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304/T12A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
今年より2回は無償点検となります。			
今回の点検はすべて正常でした。			

装置 情報	交換後運転回数：	92	更新（リセット）（実施）・未実施	消毒（総運転回数）：	32	消毒（洗剤洗浄あり）：	30
	消毒＋アル（総運転回数）：	60		消毒＋アル（洗剤洗浄あり）：	60		
	リークチェック：	40	自己洗浄：	21	アルコール単独：	1	エア単独：

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 51902/08			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
161003-006			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄	2021 年 11 月 2 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	坂口 法子 印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店	責任技術者	作業着
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25		
	TEL：092-622-0055		