

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 1 月 15 日

|       |                                                                                                       |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> |                                                                       | 製造番号： 100561      |
| 作業年月日 | 2021 年 1 月 15 日                                                                                       |                                                                       | 作業時間： 2.5 Hr      |
| 顧客名   | しば田クリニック 様                                                                                            |                                                                       | TEL： 0940-43-5222 |
| 所在地   | 福岡県福津市中央3-9-1                                                                                         |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社MVC                                                                                               |                                                                       | ご担当 青木 様          |
| 納入年月日 | 2012 年 11 月 12 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

|                                                   |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|---------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                   |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                                                   |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                                        |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|                                                   |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 点検項目                                              |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| フタロック                                             | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                                             | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                                          | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 546    |
| オゾンセンサ                                            | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                                             | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                                             | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                                            | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                                             | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                                                | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                                               | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                                           | 正常 | <input type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 交換済         |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                         |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 今回の点検はすべて正常でした。                                   |    |                                                                 |              |    |                                                 |
| 今回はカラータッチパネルを交換いたしましたので¥25,000（税別）別途ご請求させていただきます。 |    |                                                                 |              |    |                                                 |

|      |              |                                                     |             |                |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 844 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌/消毒： 9232 | 殺菌/消毒+7L： 5773 |
|      | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 2308                                          | アルコール単独： 57 | エア単独： 0        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコール拭き布     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | カラータッチパネル    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

|                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                 | 令和3年 1 月 15 日 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> | ご署名 青木 麻美 印   |

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店  
福岡県福岡市東区多の津5-11-25  
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

