

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和4年 1 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301021
作業年月日	2022 年 1 月 12 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	高嶋クリニック 様		TEL： 093-631-2340
所在地	福岡県北九州市八幡西区黒崎5-5-24		ご担当 様
販売店	東京ダイヨー器械店 北九州 様		ご担当 東 様
納入年月日	2016 年 11 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 4/5
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
今日の点検はすべて正常でした。					

装置 情報	交換後運転回数： 40	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 6	殺菌/消毒+7L： 23/
	リークチェック： 0	自己洗浄： 23/	7Lコル単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	13121647	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー	151019-001	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		令和4年 1 月 12 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 高嶋 雅子 印		

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者	作業者
	