

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 210204

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿	機種	OED-1000S
環営	環品	顧客名	中津胃腸病院 様	機番	300162
		所在地	大分県中津市大字永添 510	納入日	2014 年 01 月 30 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	2020 年 12 月 14 日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021 年 01 月 27 日

修理依頼・不具合内容

電源が入らない。焦げ臭がする。


不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

直流電源のコンデンサが故障して安全回路が働き、電源が入らない状態を確認しました。
臭いはコンデンサの電解液が噴き出した時に発生したものと推察します。
この部品の他に定期交換部品、フタパッキンを交換して復旧しました。

写真：直流電源、フタパッキン

コンデンサ

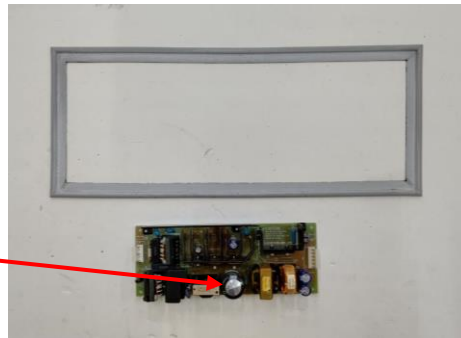

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.73 ppm・・正常
- 3：出荷時の装置情報
 - 消毒：1063、消毒＋アルコール：314、リークチェック：306
 - 自己洗浄：298、アルコール単独：307、エア単独：0

承認

松
21.02.04
永

責任技術者

中
21.02.04
澤

作成

R03.2.4

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 オゾン水濃度計、オゾンセンサ、フィルタ、触媒、排水栓	1 式	濃度計 No. 51912337 バルブ：512
2	直流電源	1 台	
3	フタパッキン	1 枚	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHI パウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1