

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 210201

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿			機 種	O E D－１０００	
客先	1	顧 客 名	浜崎クリニック 様			機 番	１００４０６	
環営	1		所 在 地	鹿児島県始良市加治木町反土 2628			納 入 日	2011 年 12 月 22 日
環品	1			点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日
		返 送 先			納入先と同じ			出 荷 日
計	3							

修理依頼・不具合内容

排水異常頻発

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水栓の開き具合が悪く、排水がスムーズに流れない状態でした。分解点検したところ排水栓を上下する部品（ポップアップ）が故障しておりました。ポップアップの他に劣化した部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式 ポップアップ



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数 189 殺菌：29、殺菌＋アルコール：554、リークチェック：278

自己洗浄：39、アルコール単独：1、エア単独：0

承認
松永
21.02.01
責任技術者
中澤
21.02.01
作成
R03.2.1
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	ポップアップ	1	
2	マニホールド周辺チューブ	1	
3	アルコールタンクキャップ	1	
4	水槽フィルタ、脱気フィルタカバー	1	

（株）IHI アグリテック （旧社名 IHIパワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1