

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 12 月 21 日

販売名 / サービスマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 800588
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 12 月 21 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	生駒外科医院 様	TEL : 0993-22-3059
所在地	鹿児島県指宿市湊2-23-20	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2020 年 11 月 13 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/18 10:08 排水異常 (E402) 対応 → 注1
 12/21 9:38, 10:16 オゾン水生成 注意 (E110) → 注3
 12/21 11:22 オゾン水異常 (E204) → 注2

不具合原因、作業内容

排水栓が「奥」側にロクとれていました。ロクと解除して
 復旧しましたが、念のため、この部品「ドレバルブASSY: ポップアップ」を交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☐ (注3)	水槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☒ 流量調整	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐ (注2)	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 631
オゾンセンサ	正常 ☒ 背面側ダンボール整理	排水栓、排水ライン	正常 ☒ 部品交換 (注1)
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 98	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 60 / 2	殺菌/消毒+7H： 38 / 1
	リークチェック： 29	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ；水槽側	☐	水フィルター	☐
	☐		接続コネクタ；チューブ側	☐	ドレバルブASSY	☒ 1
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐	ポップアップ	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 21 日

ご署名

坂上健一



修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
 TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
2020.12.21 	中澤