

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200915

発行日： 2020 年 9 月 15 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	製造番号 S00018 -300018- 作業年月日 2020 年 9 月 14 日 作業時間 Hr
顧客名	ひらたクリニック 様	TEL: 086-728-0008
所在地	福岡県北九州市八幡東区西本町3丁目6-1八幡駅ビル	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 8 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・ <u>引取</u> 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル故障修理、令和2年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

タッチパネルが起動しない現象を確認しました。これを交換して復旧いたしました。

不具合品はタッチパネルメーカーへ送り調査いたします。定期保守点検を実施しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 1110
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報は「0」にしています。

装置情報	交換後運転回数: 0	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒: 0 /	殺菌/消毒+7日: 0 /
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7日コールド: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒
交換後 No. 16062379			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		接続コネクタ; チューブ側	☒ 1		☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

工場修理につき不要です

ご署名

印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者

作業者

