

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28 年 / 2 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 :	/ 0007 /	
作業年月日	平成 28 年 / 2 月 8 日		作業時間 :	/ Hr	
顧客名	トキ会病院		TEL :		
所在地			担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入	☐	
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期点検実施			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 707
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数 :	715	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌 :	4563	殺菌+7L :	4022
	リークチェック :	4864	自己洗浄 :	1624	7Lコール単独 :	947	エア単独 :

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
排気フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店 福岡県福岡市東区多の津5-11-25 TEL : 092-622-0055	責任技術者	作業者
		武田