

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 211001

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 福岡支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	岡部病院 様			機番	300428
環営	所在地	福岡県糟屋郡宇美町明神坂1丁目2番1号			納入日	2014年10月17日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021年08月02日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2020年09月15日
計	3					

不具合内容・依頼内容

オゾン水生成注意（E110）およびオゾン水生成異常（E207）が頻発する

不具合原因（故障箇所）と処置


〔1〕異常内容につきまして

オゾン水の生成時間が規定値（6分）を超えると発生します。
主な原因は機械の故障や使用環境（水質、水温、内視鏡以外の物を入れた）等が考えられます。

〔2〕点検結果・作業内容

運転条件を振って確認しましたが、故障箇所や異常はありませんでした。
夏場は水温が高く、オゾン水濃度が上がりにくい環境なので、上記の要因が複合して異常が発生したと推察いたします。念のためにオゾン水循環系の部品を交換しました。

写真：交換部品一式

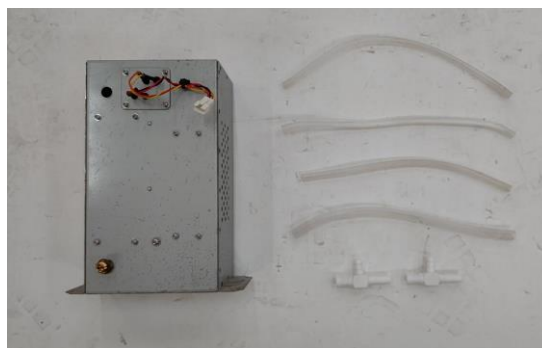

〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・下表と写真を参照ください
- 3：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 4：運転確認・・・正常
- 5：装置情報

交換後運転回数：1425→0 消毒：5423、殺菌＋アルコール：4334、リークチェック：29
自己洗浄：1494、アルコール単独：30、エア単独：8

交換部品

承認
松 '21.10.01 永
審査
中 '21.10.01 澤
作成
R03.10.1 中澤

部品種類	部品名称	数量	備考
	アスピレータ	2個	チューブ含む
	オゾン発生装置	1式	