

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190717
発行日: 2019 年 7 月 22 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 S00317
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 7 月 19, 22 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	いい・かねゆきクリニック 様	TEL: 0997-55-0303
所在地	鹿児島県奄美市名瀬長浜町4-11	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 5 月 30 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
起動後「IH1 OED」画面後再起動する	
不具合原因、作業内容	
7/19 状況確認 7/22 部品交換	
フタロックソレノイドが原因で 24V 系統が動作不安定になっていました	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 500g x 2 残 6.5MPa	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 881
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒ 穴あき	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0302 / T11.A
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数: 104	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1 / 0	殺菌/消毒+アル: 104 / 4
	リークチェック: 105	自己洗浄: 5	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
基板 (24V、リレー)	☒ 名 1		接続コネクタ; チューブ側	☐		
フタロックソレノイド	☒ 1		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		

お客様ご確認署名欄	鹿児島県奄美市名瀬長浜町4番11号 いい・かねゆきクリニック 院長 伊井 強 ご署名 1997-55-0303 2019.7.22	日 伊井 強 印
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤 澤	中澤