

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 10 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300281
作業年月日	2021 年 10 月 20 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	竹山ファミリークリニック 様		TEL： 092-558-2152
所在地	福岡県福岡市南区五十川2-26-5番地		ご担当 様
販売店	スマイルラボ 様		ご担当 古賀 様
納入年月日	2014 年 3 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 338
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒ 左上部の穴はあり	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☐	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

■今回はカラータッチパネルを交換致しましたので¥25,000（税別）を、別途ご請求させていただきます。

今日の点検は全て正常でした。

装置情報	交換後運転回数： 921	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1394	殺菌/消毒+7L： 2989
	リークチェック： 3	自己洗浄： 1281	7Lコル単独： 20	エア単独： 12

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	12081145	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー	180517-001	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

令和3年 10 月 20 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山田

印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

