

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 210908

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	クリスタルビルクリニック 様			機番	300033
環営	所在地	福岡市中央区天神4丁目6-7 天神クリスタルビル8F			納入日	2012年11月26日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021年08月23日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2021年08月31日
計	3					

修理依頼・不具合内容

水槽より水漏れ
※現地にて漏れ箇所を確認済み

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽下部と、濃度計フィルタ裏板に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました。
ご使用回数、経年劣化、水圧等の外力が複合的に作用して亀裂が生じたと推察いたします。
水槽下部の亀裂は溶接し、裏板側は充填剤で修理しました。

写真1：水槽下部



写真2：濃度計フィルタ裏板



[2] 修理・点検内容

- 1：水槽修理
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：装置情報

4/2 交換後運転回数：942 消毒：16873、消毒＋アルコール：6007、リークチェック：3990
自己洗浄：2161、アルコール単独：13、エア単独：35

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

承認

松
21.09.08
永

責任技術者

中
21.09.08
澤

作成

R03.9.8

中澤

（株）IHI物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.2