

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 1 月 15 日

|       |                               |                                                                       |      |                                    |  |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S          |                                                                       | 製造番号 | 300020                             |  |
| 作業年月日 | 平成 26 年 1 月 15 日              |                                                                       | 作業時間 | Hr                                 |  |
| 顧客名   | さくら病院 様                       |                                                                       | TEL  | 096-286-8111                       |  |
| 所在地   | 熊本県上益城郡益城町広崎1445番地15          |                                                                       | 担当   | 様                                  |  |
| 販売店   |                               |                                                                       | 担当   | 様                                  |  |
| 納入年月日 | 平成 25 年 3 月 21 日              | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品  |                                    |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 年 回目 | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>   |                                                                       |      | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |  |

|                                         |                                                                    |           |                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                         |                                                                    |           |                                                    |
| 1/9 濃度値が異常 → 濃度計スクリューが原因です。             |                                                                    |           |                                                    |
| 1/4 光量低下異常 → オゾン水濃度計ランプの点灯が遅いことが考えられます。 |                                                                    |           |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                              |                                                                    |           |                                                    |
| 急のため上記部品を交換しました。                        |                                                                    |           |                                                    |
| 点検項目                                    |                                                                    |           |                                                    |
| フタロック                                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 813    |
| オゾンセンサ                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 給水は遅い                       | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認                                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項              |                                                                    |           |                                                    |

|          |              |                                                                               |         |            |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 715 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒: 178 | 消毒+7M: 537 |
|          | リークチェック: 161 | 自己洗浄: 264                                                                     | 7M単独: 0 | エア単独: 3    |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 濃度計用ファイル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26 年 1 月 15 日

ご署名 権原 崇博 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所  
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6  
TEL: 086-944-6528

|               |               |
|---------------|---------------|
| 責任技術者         | 作業者           |
| H26.1.15<br>申 | H26.1.15<br>申 |