

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 11 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100358
作業年月日	2021 年 11 月 15 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	中村循環器科心臓外科医院 様	TEL： 092-324-6000
所在地	福岡県糸島市波多江263-1	ご担当 田原 様
販売店	富士フィルムメディカル(株)福岡支店 様	ご担当 様
納入年月日	2012 年 2 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検ソール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 498
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
今回の点検は全て正常でした。					

装置 情報	交換後運転回数： 180	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒： 6748	殺菌/消毒+7L： 639
	リークチェック： 615	自己洗浄： 435	7Lコル単独： 1	エア単独： 150

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ポンプ水濃度計	10120482	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー	200416-004	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

令和3年 11 月 15 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 田原 靖子 印

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

