

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____

発行日 平成24年9月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100300
作業年月日	平成24年 9月 19日		作業時間: _____ Hr
顧客名	中部協同病院		TEL: _____
所在地			担当 様
販売店	中央医療器		担当仲宗根 様
納入年月日	平成 23年 8月 19	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 471
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ トレイ - 左下ひびあり	殺菌チューブ類	正常 ☒ オゾン水漏れ確認
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: _____	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 541	殺菌+7L: 441
	リークチェック: 845	自己洗浄: 252	7Lノール単独: 66	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2012 年 9 月 19 日

ご署名 仲宗根 義孝 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者 作業者

責任技術者	作業者