

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年10月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100301
作業年月日	平成 24 年 10 月 24 日		作業時間: / Hr
顧客名	島袋内科 胃腸科 様		TEL: 098-886-7085
所在地	沖縄県那覇市首里鳥堀町4-7		担当 様
販売店	株中央医療器		担当 宮城 様
納入年月日	平成 23 年 10 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/4 20:04 待電 E:403

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 521
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 387	更新 ☒ (セット) 実施・未実施	殺菌: 103	殺菌+7L: 284
	リークチェック: 387	自己洗浄: 236	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正（交換）		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正（交換）		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H24 年 10 月 24 日

ご署名 島袋隆平

監

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

