

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24 年 11 月28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100303
作業年月日	平成24 年 11 月28 日	作業時間: / Hr
顧客名	平田胃腸科 内科 様	TEL: 098-869-7272
所在地	沖縄県那覇市銘苅3-22-33 R8ビル1F	担当 様
販売店 (株)中央医療器		担当 宮城常務 様
納入年月日	平成 23 年 11 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
7/11 11:57 酸素-12が異常 E:200	
8/21 17:00 " "	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ バルブ数 437
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 1614	更新 (リット) 実施・未実施	殺菌: 828	殺菌+7L: 786
	リークチェック: 1615	自己洗浄: 282	7Lコル単独: 15	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
オゾンセンサ校正 (交換)		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名	銘苅 弘美	印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	