

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 4 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 1000217
作業年月日	平成 25 年 4 月 25 日		作業時間: / Hr
顧客名	西崎病院		TEL: :098-992-0055
所在地	沖縄県糸満市座波 371-1		担当 様
販売店 (株)中央医療器			担当 平良 様
納入年月日	平成 23 年 4 月	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
5/21 8:26 排気異常 2 E2402 5/19 14:49 停電 E2403			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 650
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 205	更新 (更新) (実施) ・未実施	殺菌: 257	殺菌+7L: 552
	リークチェック: 789	自己洗浄: 194	7L単独: 9	エア単独: /

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒				☐	
排水栓		☒				☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒				☐	
コネクタ継ぎ手 (本体側)		☒				☐	
オゾンセンサ校正 (交換)		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日 署名 西崎 優子 印	

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	