

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 5月31日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100177
作業年月日	平成 25 年 5 月 31 日		作業時間: / Hr
顧客名	前田胃腸科医院		TEL: 098-832-4889
所在地	沖縄県那覇市三原2-15-12		担当 様
販売店	(株)琉球光和		担当 新里 様
納入年月日	平成 23 年 4 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 65/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1020	更新 ☒ (セット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 1188	殺菌+7L: 942
	リークチェック: 3	自己洗浄: 490	7Lアルコール単独: 106	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒	/			☐	
コネクタ継手(本体側)		☒	/			☐	
オゾンセンサ校正(交換)		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 城間 泰子		印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者