

保守点検・修理 報告書

発行日 平成 25 年 6 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号： 100342
作業年月日	平成 25 年 6 月 4 日				作業時間： / Hr
顧客名	古謝内科				TEL： 098-855-2320
所在地	那覇市泉崎2-7-2 コト-泉1F				担当 様
販売店	㈱琉球光和				担当 新里 様
納入年月日	平成 23 年 11 月	日	保証期間	内	外
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年 回目
	出張・引取	☐	修理	☐	定期点検シール記入 ☒
					修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
※今回のみキャンペーン対象になり無償。 吸気フィルター交換			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 682
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数： 556	更新 (リット) (実施)・未実施	殺菌： 15	殺菌+7L： 54/			
	リークチェック： 1	自己洗浄： 338	7Lコントロール単独： 1	エア単独： 0			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	/			☐	
コネクタ-継手 (本体側)		☐				☐	
オゾンセンサ-校正 (交換)		☒	/			☐	
お客様ご確認署名欄							
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。							
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。							
ご署名 天久知子 年 月 日 印							
修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店				責任技術者		作業者	
沖縄県浦添市仲間 1-19-6							
TEL： 098-876-4262							

