

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年8月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100176
作業年月日	平成25年8月9日		作業時間: 1 Hr
顧客名	わくさん内科		TEL: 098-895-1900
所在地	沖縄県中頭郡中城村字屋宜597-13		担当 仲村 様
販売店	中央医療器		担当 上原健一 様
納入年月日	平成23年6月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
10/17 停電			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED 正常 レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン 正常 レ
アルコールライン	正常	レ	アルコールキャップ 割れ
オゾンセンサ	正常	レ	オゾン水濃度計動作 正常 レ
給水ライン	正常	レ	排水栓、排水ライン 正常 レ
濃度計流量	正常	レ	細管送水ライン 正常 レ
水位センサー	正常	レ	排気ライン 正常 レ
水漏れ確認	正常	レ	オゾン濃度 正常 レ
清掃	正常	レ	異常音、振動 正常 レ
トレー	正常	レ	電源コード 正常 レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ	殺菌チューブ類 正常 レ
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
アルコールのキャップが割れていたため交換が必要			

装置 情報	交換後運転回数: 175	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 2	殺菌+7L: 330
	リークチェック: 401	自己洗浄: 170	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	排水栓		レ	1
分解触媒		レ	1	接続コネクタ		レ	2
オゾンセンサー		レ	1			☐	
フィルター		レ	1			☐	
吸盤		レ	3			☐	

お客様ご確認署名欄		2013年 8月 9日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 <u>仲村 ひとし</u> 印		

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城