

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年8月8日

|       |                                          |                                 |                                                       |                                               |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                 | 製造番号:                                                 | 100280                                        |
| 作業年月日 | 平成 25 年 7 月 18 日                         |                                 | 作業時間:                                                 | 1 Hr                                          |
| 顧客名   | あがりえクリニック                                |                                 | TEL:                                                  | 0980-43-0271                                  |
| 所在地   | 沖縄県名護市大東1丁目5-34                          |                                 | 担当                                                    | 岸本 様                                          |
| 販売店   | 琉球光和                                     |                                 | 担当                                                    | 新里 様                                          |
| 納入年月日 | 平成 23 年 5 月 23 日                         | 保証期間                            | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>   | 1年 1回目                                                | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>             | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                       |                                               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |                                                                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 347    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0,65 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |              |  |                         |  |            |            |
|----------|--------------|--|-------------------------|--|------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 39  |  | 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施 |  | 殺菌： 2      | 殺菌＋アル： 105 |
|          | リークチェック： 108 |  | 自己洗浄： 30                |  | アルコール単独： 0 | エア単独： 1    |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|---------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン濃度計  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 吸盤      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 水フィルター  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2013 年 7 月 18 日

ご署名

岸本 見奈子

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店  
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6  
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者