

保守点検・修理 報告書

管理 No. 131217
発行日 平成 25年12月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100161
作業年月日	平成 25年 11月 27日		作業時間:	Hr
顧客名	アワセ第一医院 様		TEL:	098-937-5536
所在地	沖縄県沖縄市泡瀬2-54-26		担当	様
販売店	(株)琉球光和		担当	様
納入年月日	平成 22年 11月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	トレ、コード、給排水ホース
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
オゾン水生成異常 (E:207)、濃度維持異常 (E:302)			
不具合原因、作業内容			
オゾン水生成注意、濃度維持異常・・・オゾン発生器の能力が低下していましたので交換しました。			
水温や水質によりオゾン水濃度が上がりにくい場合がありますので			
引き続き様子を見てくださいますよう、お願いいたします。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
部品交換後10回運転し異常ありませんでした。運転プログラムVer0105⇒Ver0107			
タッチパネルプログラムVer2.5⇒Ver2.7書換え (殺菌履歴をCDにバックアップしました)			

装置 情報	交換後運転回数: 372⇒5	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒:	197	消毒+7L:	1165
	リークチェック: 1257	自己洗浄: 913	7Lコール単独:	1	エア単独:	2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾン発生器		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

機械受付日: 平成 25年 9月 25日
修理品管理票 08-11232

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	