

IHIシバウラ御中 中澤様 熊本県から移動分です。

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成26 年 7 月22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100200
作業年月日	平成 26 年 7 月 22 日		作業時間:	/ Hr
顧客名	浦添セレブクリニック胃腸科内科様		TEL:	098-871-0123
所在地	沖縄県浦添市城間2-7-1		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	宮城 様
納入年月日	平成26年 7 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 618
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 832 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 3.5	殺菌+7L: 292.0
	リークチェック: 8	自己洗浄: 628	7L単独: / エア単独: 239

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒	1			☐	
コネクタ-継手(本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正(交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

瀬 魚 美

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

発信元:有)ライツ

ファクス番号:0924834378

2014. 7. 4 10:40 P. 2

FAX:0926220052

0926220052

2014/06/30 09:33

#057 P.002/002

中古医療機器の販売・移動に係る事前通知書

株式会社 IHシバウラ
機械事業本部 営業サービスグループ
担当殿

TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

株式会社 新鋭工業福岡
福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25

担当者:武田
TEL:092-622-0055
FAX:092-622-0052

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度以下のとおり中古品の販売・移動を行いますので、薬事法施工規則第170条に基づいてご連絡いたします。つきましては、内容確認の上、ご回答をお願いいたします。

—記—

通知日	平成 26 年 6 月 27 日
製品名称	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000
製造番号	100200
承認番号	22000BZZ000009000
クラス分類	管理医療機器
特定保守	該当

現在使用している医療機関

名称	三森循環器科・呼吸器科病院 様
納入年月日	平成 22 年 12 月 21 日
住所	熊本県山鹿市大橋通1204
電話番号	0968-42-1234
保守点検状況	平成23年、24年に実施。修理歴なし

販売・移動を予定している医療機関

名称	浦添セブクリニック 胃腸科・内科
使用開始予定日	平成 26 年 7 月 30 日
住所	沖縄県 浦添市 城間 2-7-1
電話番号	098-871-0123
備考	

製造販売業者からの連絡・回答欄

回答日・担当者	平成 26 年 6 月 27 日 (株)IHシバウラ サービスGr 中瀬
注意(指示)内容	1. 特定保守管理医療機器に該当しますので、保守点検を受けてください
	2. 取扱説明書、添付文書、簡易取扱説明書が付属されていることを確認してください

★5年間保存