

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

お客様	名称	相澤歯科医院	製造番号	14060099	点検実施日	2018年6月18日	承認印	
	住所	新潟県新潟市西区	運転回数	2991回	点検実施者	IAT 中村		
	納入場所	小新 5-5-12	サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認 - 増・締め実施☒ フック取付け状態・動作確認☒ フックパネ・フック螺番ピンの取り付け状態☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ☒ フック検出ユニット作動確認☒ ドアロックユニット作動確認☒ 蓋板のキズ・汚れ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無☒ 滅菌温度センサの汚れ☒ 網カゴの破損・汚れ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ☒ 給気弁の作動状態・漏れ☒ 排気弁の作動状態・漏れ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)☒ ストレーナーの汚れ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒ ソケット他溶接割れ・漏れ☒ フランジパッキン漏れ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認☒ 真空到達度

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ : 清掃実施☒ 下部給水弁の漏れ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ : フッ素交換☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ : 清掃実施☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認☒ 電源スイッチの作動状態☒ 行程表示LEDの点灯☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ☒ 各基板のコネクター緩み確認☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒ 本体の水平確認・基準傾き内☒ アジャスタフットの緩み・設置状態☒ キズ・汚れ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 : メンテナンスカバー無

制御

☒ 運転プログラムの確認☒ 入力・出力確認☐ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ : 交換☒ エアークリーナーのつまり・汚れ

性能評価

☒ ケミカルインジケータによる判定 (デタルモード)☒ リークチェック (バキュームテスト)

インジケータ貼り付け

運転確認

合・否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
給水タンク キップ	1
給水タンク ストレーナ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030